

GRAVI-HCG®

(Kassettentest)
 (Tesztkazetta)

*In vitro (külsőleg alkalmazandó) diagnosztikai teszt önellenőrzésre
 Útmutató a teszt használatához – alaposan olvassa el használat előtt!*

Bevezetés

A GRAVI-HCG® (Kassettentest) (GRAVI-HCG® -Tesztkazetta) a terhesség korai felismerésének céljából a humán chorion-gonadotropin (hCG) vizeletből történő kvalitatív kimutatására szolgáló immunológiai gyorsesztesz. A vizelettel ürülő hCG szelektív kimutatása monoklonális antitestek segítségével történik. Magas, 20 mIU/ml-es érzékenysége révén a GRAVI-HCG® (Kassettentest) (GRAVI-HCG® -Tesztkazetta) teszt képes arra, hogy a terhességet már igen korai stádiumában megbízhatóan kimutassa.

A tesztcsomag tartalma:

A GRAVI-HCG® (Kassettentest) (GRAVI-HCG® -Tesztkazetta) tesztcsomag 1 db tesztkazettát és 1 db használati útmutatót tartalmaz.

A fóliatasakban lévő páramentesítő anyag nem képezi a teszt részét, a tesztcsomag felbontása után eldobható!

További szükséges eszközök (nem képezik a csomag részét):


Edény a mintavételhez és stopperóra.

A teszt elvégzése:

A vizeletmintát tiszta, száraz edénybe gyűjtse. Elsősorban reggeli vizeletet ajánlott a teszthez felhasználni, amely rendszerint magasabb hCG koncentrációt mutat, mindazonáltal bármely napszakban vett vizeletminta használható.

A tesztkazettákat csak a mintavétel után, közvetlenül a teszt elvégzése előtt szabad kivenni a fóliatasakból, hogy elkerüljük a membráncsikra történő páralecsapódást.

1. Vegye ki a tesztkazettát a fóliatasakból, és helyezze tiszta, száraz és vízszintes felületre.
2. Szívjon fel a pipettával vizeletet, és a pipettát függőlegesen tartva cseppentsen 120 µl vizeletet (a mennyiség-jelölés szerint, vagy három teljes cseppet) *levegőbuborék nélkül* a kerek mintanyílásba (az ábra szerint).
3. Három perc múlva, de legkésőbb 5 perc elteltével olvassa le az eredményt.

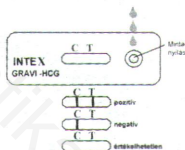

A teszt kiértékelése:

Eredményablak:



Nem terhes

Csak a rózsaszín ellenőrző vonal (C) látható. A teszterületen (T) nem tapasztalható elszíneződés.



Terhes

A rózsaszín ellenőrző vonal (C) mellett a teszt ablakban (T) is megjelenik egy azonos erősségű, vagy gyengébb rózsaszín vonal.



Értékelhetetlen

Amennyiben nem látható a rózsaszín ellenőrző vonal (C), a teszt értékelhetetlen. Kérjük, ismétlje meg a vizsgálatot egy új tesztkazettával.

A teszt akkor is értékelhető, ha az ellenőrző vonal halványabb színű, mint a tesztvonal.

A pozitív eredmény azt mutatja, hogy Ön valószínűleg terhes. További útmutatásért kérjük, keresse fel orvosát!

A negatív eredményt egy héttel később, illetve a menstruációs vérzés ismételt kimaradása után felül kell vizsgálni a GRAVI-HCG® teszt újbóli elvégzésével. Amennyiben annak eredménye ismételten negatív, kérjük, keresse fel orvosát!

Amennyiben kérdései merülnek fel az eredményekkel kapcsolatban, vagy a hCG vizsgálat kiértékelése problémát jelent Önnek, kérje orvosa tanácsát.

Kérdések és válaszok

Alkohol, kávé vagy ételek befolyásolhatják-e a teszt eredményét?

Nem.

Miért szükséges a menstruációs vérzés kimaradása utáni napon a reggeli első vizeletet használni a vizsgálat elvégzésekor?

A reggeli vizeletben - miután az éjszaka folyamán hosszabb ideig gyülik a húgyhólyagban - megnő a hCG koncentrációja. Fontos tehát ezt az első vizeletet használni, hogy már a menstruációs vérzés kimaradása utáni első napon a lehető legbiztosabb eredményt kapja.

A tesztvonal (T) halvány rózsaszín elszíneződése is jelezhet terhességet?

Igen, már halvány rózsaszín elszíneződés is terhességet jelezhet.

Honnan tudhatom, hogy a teszt működött-e?

Amennyiben a rózsaszín ellenőrző vonal (C) megjelenik, a teszt jól működött.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos hCG tartalmú gyógyszerek szedése fals pozitív eredményhez vezethet.

Fontos tudnivalók:

- A tesztcsomagot ne használja fel a karton csomagoláson feltüntetett lejárati dátum után.
- A csomagot óvni kell a hőmérséklet ingadozásától, 2 és 30°C között kell tárolni. A tesztet 15 és 28°C között kell elvégezni.
- A csomagot csak közvetlenül felhasználás előtt szabad kinyitni.
- A reakció kezdete után további vizelet hozzáadni nem szabad.
- A teszt csak egyszer használható.
- A teszt elvégzése előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, és pontosan kövesse azt.
- A teszt nem helyettesítheti az orvosi vizsgálatot. Kétség vagy hibás alkalmazás esetén forduljon orvosához!
- A csomag tartalma csak külsőleg alkalmazható!
- Gyermekektől távol tartandó.

Cikkszám:

GH3301: GRAVI-HCG®(Kassettenest) (GRAVI-HCG® - Tesztkazetta) 1 db-os tesztkazetta csomag

SZIMBÓLUMOK

REF

Termékszám



Egyszeri használatra

LOT

Gyártási szám



Szavatossági idő



Tárolás
szobahőmérsékleten



A doboz tartalma <n> vizsgálat
elvégzéséhez elegendő

IVD

In vitro (külsőleg
alkalmazandó)
diagnosztikum

CE 0123

Gyártja: INTEX Pharma GmbH, Im Kränzliacker 9, D-79576 Weil am Rhein

Forgalmazza: INTEX Pharmazeutica AG, Hofackerstrasse 77, CH-4132 Muttenz

INTEX DIAGNOSTIKA

Gyártó:

INTEX Pharma GmbH

Im Kränzliacker 9
D-79576 Weil am Rhein
Tel: (0049) 7621 940 90 80
Fax: (0049) 7621 940 90 84

[service@intex-
diagnostika.com](mailto:service@intex-diagnostika.com)

Forgalmazó:

INTEX Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel: (0041) 61 465 90 70
Fax: (0041) 61 465 90 71

[service.ch@intex-
diagnostika.com](mailto:service.ch@intex-
diagnostika.com)

Forgalmazó:

IDSAN Kft.

Árpád u. 3/b. fdst. 1.
H-1195 Budapest
Tel: (0036) 1 357 65 98
Fax: (0036) 1 357 65 99

intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com